

Hoe zet je de fles in elkaar:



1
Plaats het doseerklepje in de speen.



2
Zorg ervoor dat het klepje goed vastzit, gelijk met de speen.



3
Trek de speen door de onderkant van de speenring.



4
Druk de speen goed aan, zodat deze goed vast zit.



5
Druk het ventieldopje stevig in de ventiel-schacht.



6
Plaats het ventiel op de fleshals.



7
Zorg ervoor dat het ventiel contact maakt met de bovenkant van de fles.



8
Draai de speenring met het doseerklepje op de fles.

- De onderdelen van deze fles zijn geen speelgoed. Ze zijn niet ontworpen om voor iets anders te worden gebruikt dan voor het geven van voeding. Haal de fles uit de mond van het kind zodra u klaar bent met voeden.
- Controleer vóór elk gebruik de speen op scheurtjes of slijtage en vervang deze indien nodig. Nooit in de spenen snijden of het gaatje vergroten! Vervang de spenen in elk geval om de 6 weken.
- Gebruik Dr. Brown's spenen. Spenen van andere fabrikanten zullen de functie van dit bijzondere voedingssysteem mogelijk nadelig beïnvloeden.
- Om lekken te voorkomen tijdens transport, kunt u gebruik maken van de speciale afsluitdoppen van Dr. Brown's.
- Het Specialty Feeding System is verkrijgbaar in onze webshop www.drbrowns.nl.

Dr. Brown's® wordt in Nederland en België geïmporteerd en gedistribueerd door:

Dr. Brown's

Baby Case B.V.
Huijgevoort 22
5091 SB Westelbeers
Nederland
T +31 (0)229 28 59 99

info@drbrowns.nl
www.drbrowns.nl
info@drbrowns.be
www.drbrowns.be



Dr. Brown's
Medical

Dr. Brown's® Specialty Feeding System

Met het speciaal voor zuigelingen ontwikkelde doseerklepje

Het Dr. Brown's Specialty Feeding System is ontworpen in samenwerking met medische professionals. De unieke combinatie van fles, speen en doseerklepje is speciaal ontwikkeld voor het verlichten van gecompliceerde orale voedingsproblemen. Het systeem blijkt zeer effectief voor zuigelingen en flesvoedingskinderen die ernstige problemen hebben met het efficiënt innemen van voeding.

Belangrijk - Raadpleeg uw specialist voordat u het Specialty Feeding System van Dr. Brown's gebruikt om er zeker van te zijn dit flessysteem geschikt is voor het voeden van uw kind.



Great benefits for babies and those who care for them.

SPECIFIEKE VOORDELEN VAN HET SPECIALY FEEDING SYSTEM VAN DR. BROWN'S *

• Voorzien van een uniek Zero Resistance systeem.

Dit interne ventielsysteem elimineert elke weerstand gedurende het voeren. Het systeem voorkomt de negatieve effecten van een vacuüm, waardoor symptomen van koliek, spugen, boertjes en winden verminderen. Als de baby drinkt, komt de voeding in de mond terecht en verlaat de lucht de vloeistof middels het ventielsysteem. Hierdoor blijven belangrijke voedingsstoffen en vitamines behouden.

• De baby kan zelfstandig voeding uit de speen halen.

Zodra de fles gevuld is met een vloeistof en het blauwe doseerklepje in de speen geplaatst is, hoeft de verzorger alleen de speen in de mond van de baby te doen. Het doseerklepje voorkomt een te grote hoeveelheid vloeistof in de intra-orale ruimte. De baby kan vervolgens zelfstandig drinken door eigen kaak- en tongbewegingen. Hierdoor wordt het risico op het ontwikkelen van voedingsintolerantie of weigeren van de voeding verminderd. De verzorger hoeft niet in de speen te knijpen om de baby te voeren. Dit systeem maakt het voeren kindgericht en laat het kind veilig en efficiënt drinken.

• Amerikaanse schisisklinieken bevestigen dat baby's die deze fles gebruiken beter drinken dan uit andere flessen, sneller in gewicht toenemen en eerder geopereerd kunnen worden.

• Minder kans op terugval in gewichtsgroei en daardoor minder kans op heropname.

• Het doseerklepje past in alle Dr. Brown's smalle hals spenen.

Gebruik de Preemie, Ultra-Preemie of New Born/Transition speen voor een langzamere doorstroming.

Gebruik fase 1 tot 4 voor een snellere doorstroming.

• Het doseerklepje bestaat uit één stuk en past maar op één manier in de speen.

• Geen specifieke handelingen vereist van de verzorger vanwege het eenvoudige gebruik.

Het is niet nodig om de speen te draaien om de doorstroming te regelen.

• Inclusief een afdekop om de speen te beschermen.

• Heeft het uiterlijk van een normale babyfles.

• De aanschafprijs is relatief laag.

*Volgens Dr. Brown's Medical Division of Handi Craft Company (USA).

OPMERKINGEN:

• **LET OP:** Het Dr. Brown's Specialty Feeding System functioneert optimaal wanneer zowel het ventielsysteem als het doseerklepje in de fles zijn geplaatst.

• Het Specialty Feeding System is net als de gewone Options+ Bottle van Dr. Brown's ontwikkeld voor het geven van melk en gladde papsoorten. Voor vezelrijke pap zijn de flessen minder geschikt, omdat de voeding indikt naarmate de tijd van het voeren verstrijkt. Vaak is het een kwestie van uitproberen tot welke dikte de voeding goed doorstroomt. Bij het geven van dikkere voeding adviseren wij één of twee fases hogere speen te gebruiken dan bij normale voeding. In dat geval kan eventueel de fles alleen met het doseerklepje, dus zonder het ventielsysteem worden gebruikt. Op deze manier ondervindt u niet de voordelen van het vacuüm vrij voeren, maar wel de voordelen van het doseerklepje.

• Het volledig geassembleerde systeem bestaat uit een 120 ml of een 250 ml flesje met een intern ventielsysteem, een Dr. Brown's standaard siliconen speen Fase 1 speen en twee doseerklepjes.

• Alle fases van Dr. Brown's smalle hals spenen kunnen met dit flessysteem worden gebruikt.

De keuze van de speen is afhankelijk van de individuele zuigbehoefte van de zuigeling.

• Het volledige flessysteem - inclusief speen en doseerklepje - is BPA-vrij en bevat geen pvc, lood en ftalaten.

HET SPECIALY FEEDING SYSTEM KAN WORDEN GEBRUIKT BIJ*

• Craniofaciale anomalieën - gespleten lip / gehemelte waarbij een kind niet op een speen kan zuigen, zowel unilateraal als bilateraal.

• Pierre Robin-syndroom.

• Sterk gebogen gehemelte.

• Baby's die weinig zuigkracht hebben, bijvoorbeeld bij het syndroom van Down.

• Baby's met hartaandoeningen. Dr. Brown's SFS kan gebruikt worden om energie te sparen tijdens het voeren. Baby's kunnen de SFS tijdelijk gebruiken totdat hun zuigkracht sterker is en ze hun energie behouden tijdens het voeren. Zodra de baby sterker is, kan het flesje gebruikt worden zonder het doseerklepje.

• Baby's in de NICU met voedingsproblemen. De overgang van sondevoeding naar normale flesvoeding wordt vergemakkelijkt door Dr. Brown's SFS. Hiermee vermindert het aantal gevallen waarbij een maagsonde nodig is.

*Volgens Dr. Brown's Medical Division of Handi Craft Company (USA).

REINIGEN:

• Het flessysteem is geen wegwerpsysteem. Het kan worden hergebruikt.

• **Reinigen vóór het eerste gebruik:** Zorg voor een schoon oppervlak en schone handen. Was de fles en alle onderdelen af met handwarm water en afwasmiddel. Steriliseer ze daarna.

• **Reinigen na elk gebruik:** Zorg voor een schoon oppervlak en schone handen. Haal de fles direct na het voeren uit elkaar en spoel fles en onderdelen af met koud water. Was ze daarna in handwarm water met afwasmiddel of in het bovenste rek van de vaatwasser op maximaal 60 °C. Maak het ventielsysteem schoon met het bijgeleverde reinigingsborsteltje. Spoel alle onderdelen goed af met warm water. Laat de fles en onderdelen afkoelen en drogen op een schone droge doek.

• Flessen en flesonderdelen kunnen worden gesteriliseerd. Gebruik voor het steriliseren een magnetronsterilisator, sterilisatiezakje of stoomsterilisator.

Steriliseert u in een pan met kokend water, zorg dan dat er voldoende water in zit. Als de fles of onderdelen de bodem of rand van de pan raken, kunnen ze vervormen. Laat de onderdelen goed afkoelen voordat u de fles in elkaar zet, eveneens om vervorming te voorkomen.

• Vermijd onnodige handelingen met gesteriliseerde onderdelen of flessen. Gebruik eventueel schone handschoenen.

• Neem altijd voorzichtigheid in acht, stoom kan ernstige brandwonden veroorzaken.

• Gebruik sterilisatie producten altijd in strikte overeenstemming met de bijgeleverde instructies van de fabrikant.

• Het schoonmaken van het ventielsysteem zal iets meer tijd vragen. Van elk onderdeel dienen melk- en/of vetresten eerst te worden verwijderd alvorens men deze steriliseert.

• Het ventielsysteem is gemaakt van zacht siliconen en dus kwetsbaar materiaal. Door intensief gebruik en/of veelvuldig steriliseren kan het ventielsysteem vervormen of de stevigheid verliezen. Hierdoor kan de fles gaan lekken of vacuüm zuigen. Vervang in dit geval het ventiel.

GEBRUIKERSTIPS:

Soms kan het voorkomen dat de Dr. Brown's fles lekt, waarbij de voeding via de speenring naar buiten komt.

Dit heeft één van de volgende oorzaken:

• **De voeding is te warm of is opgewarmd mét het ventielsysteem in de fles. Er vindt dan condensatie plaats in de ventielschacht of de lucht zet uit en stuwt de voeding omhoog door het ventiel.**

Verwarm flesvoeding niet hoger dan lichaamstemperatuur (37 °C).

Verwarm de fles altijd zonder ventielsysteem. **TEST:** Vul de 'lekkende' fles met een laagje koud water en houd de fles in een hoek van ongeveer 45°. Lekt de fles nu niet, dan is de voeding te warm gemaakt.

• **De fles is te vol.** Deze mag niet verder gevuld worden dan tot de maximumstreep.

• **De fles is geschud bij het oplossen van de melkpoeder, waardoor de voeding door het ventiel naar buiten geduwd wordt.** Los de poeder op door middel van roeren in plaats van de fles te schudden. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de langwerpige ventielschacht.

• **De fles wordt niet op de juiste manier vastgehouden tijdens het voeren.** Houd de fles in een hoek van ongeveer 45°, zodat de ventielschacht niet wordt ondergedompeld in de voeding.

• **Tijdens het verwarmen van de fles zit de speenring te strak, waardoor de voeding door het ventiel omhoog gestuwd wordt.** Draai de speenring na het verwarmen een kwartslag om de druk van de fles te halen en draai de speenring weer vast vóór het voeren.

• **Indien het dikke gedeelte van de ventielschacht nog voor meer dan 1/3 gevuld is als de fles rechtop staat,** controleer dan of de speenopening vrij is en of het ventiel en de ventielschacht goed op elkaar aansluiten. Het dikke gedeelte van de ventielschacht kan worden geleegd door speenring en het ventiel even los te draaien en alles opnieuw te installeren. Het is normaal dat de voeding in de ventielschacht beweegt, aangezien het ventiel voortdurend de druk regelt.

• **Fles of onderdelen zijn vervormd:**

- tijdens het reinigen of steriliseren

- door onvoldoende afkoeling van onderdelen bij het in elkaar zetten van de fles

In de meeste gevallen volstaat het om het ventiel te vervangen.

Door de ontwikkeling van het drinkpatroon is een kindje toe aan een volgende fase speen.